


 odel x-ray	<b>MODIFICATION NOTE</b>	IMI-0149
	ISTRUZIONI MONTAGGIO CAVO STAMPANTE ENDEAVOUR	V1R1

**Aprire la consolle C 306.36**

**Far passare il cavo nell'apposito passacavi**


**Posizionare il serracavo del cavo della stampante a **38 cm** dal connettore nero e il cavo della consolle a **25 cm** dal connettore DB9 lato maschio.**

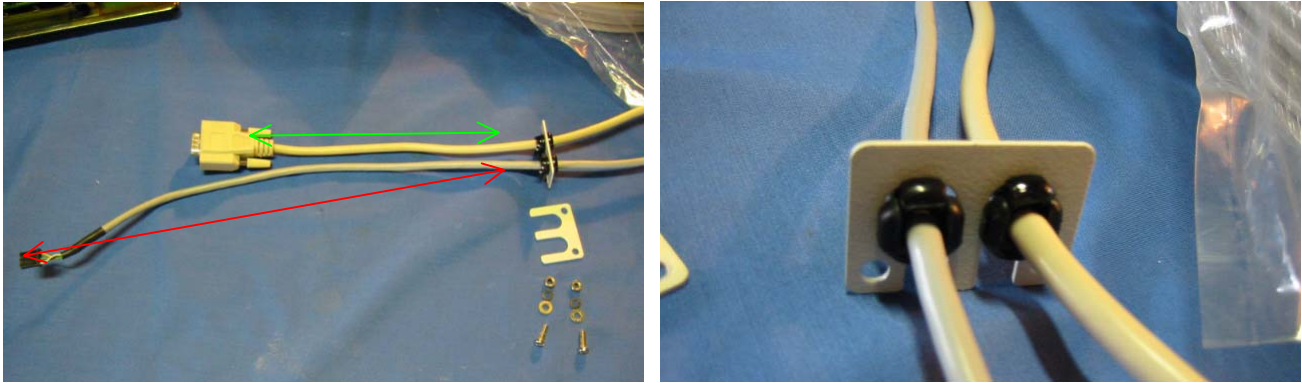

**Inserire dietro alla piastrina sagomata la piastrina a forchetta ed introdurre le due viti 4X15 (testa Bombata) nei fori di fissaggio**



**Introdurre nella cava del guscio della consolle il DB9 e in seguito il cavo stampante.**

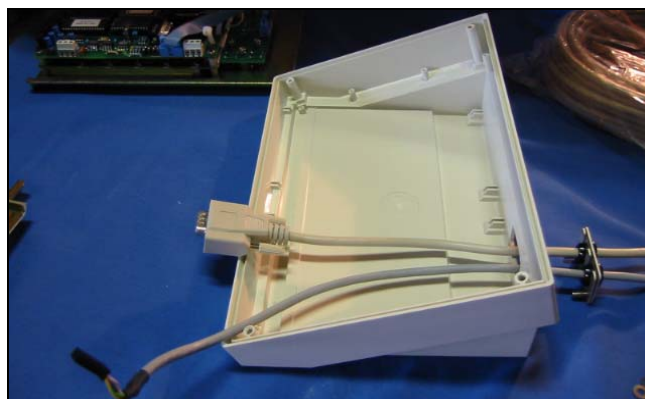

Emesso da: M.Besana	Data Emissione	16/06/05
Approvato da: M.Besana	CLASSE	13
NOME FILE E LOCAZIONE	ISO 9000/ 13 IMI / IMI-0149 MONTAGGIO CAVO STAMPANTE END.doc	FOGLIO 1 di 1



odel x-ray

# MODIFICATION NOTE

## ISTRUZIONI MONTAGGIO CAVO STAMPANTE ENDEAVOUR


IMI-0149

V1R1


Chiudere la piastrina serratavi sul guscio utilizzando due piane, due grover e due dadi M4



Agganciare il connettore DB9 e il connettore cavo stampante sulla scheda PCU

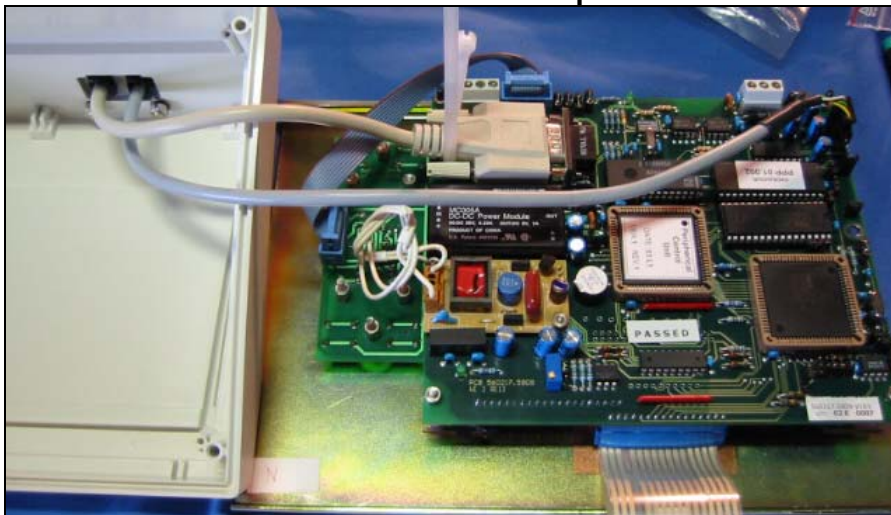

Serrare le viti che fissano il connettore DB9 e legare i due cavi allo stampato con una fascetta.

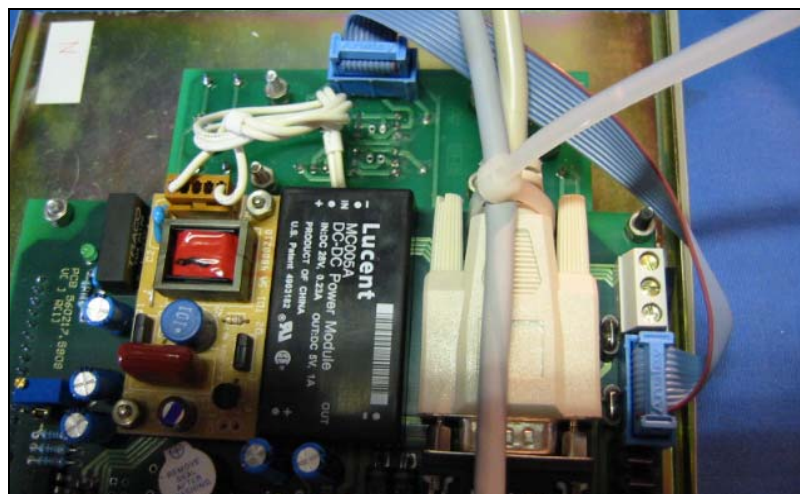

Emesso da: M.Besana	Data Emissione	16/06/05
Approvato da: M.Besana	CLASSE	13
NOME FILE E LOCAZIONE	ISO 9000/ 13 IMI / IMI-0149 MONTAGGIO CAVO STAMPANTE END.doc	FOGLIO 2 di 2



odel x-ray


# MODIFICATION NOTE

## ISTRUZIONI MONTAGGIO CAVO STAMPANTE ENDEAVOUR

IMI-0149

V1R1

**Introdurre la parte superiore della consolle nel guscio facendo attenzione che tutta la parte plastica sia inserita nella scanalatura del guscio**

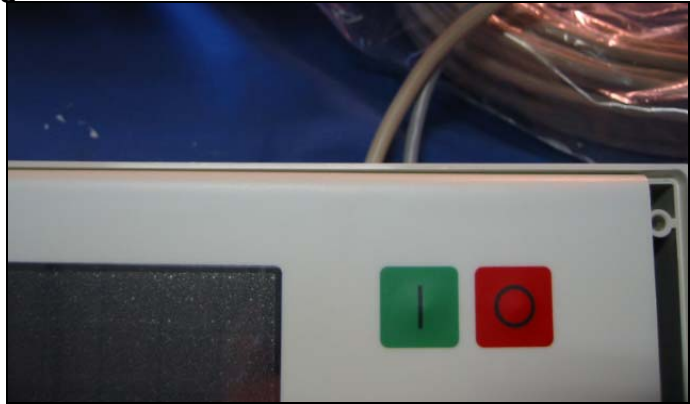

Prendere i bordi e posizzionarli ai lati della consolle



Emesso da: M.Besana	Data Emissione	16/06/05
Approvato da: M.Besana	CLASSE	13
NOME FILE E LOCAZIONE	ISO 9000/ 13 IMI / IMI-0149 MONTAGGIO CAVO STAMPANTE END.doc	FOGLIO 3 di 3



odel x-ray

# MODIFICATION NOTE

## ISTRUZIONI MONTAGGIO CAVO STAMPANTE ENDEAVOUR

IMI-0149


V1R1

Inserire la vite lunga nei due fori posteriori


Inserire la vite corta nei due fori anteriori

Pacchetto con viti di serraggio

**Attenzione:**  
non serrare a fondo

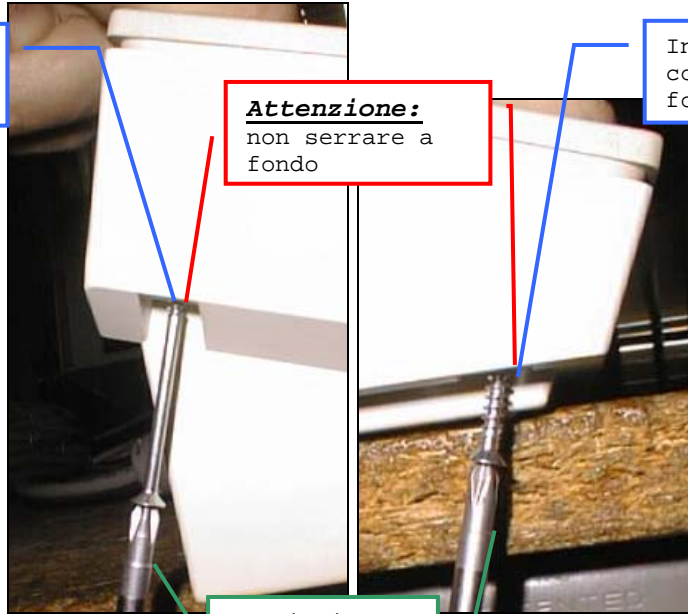

Cacciavite a croce

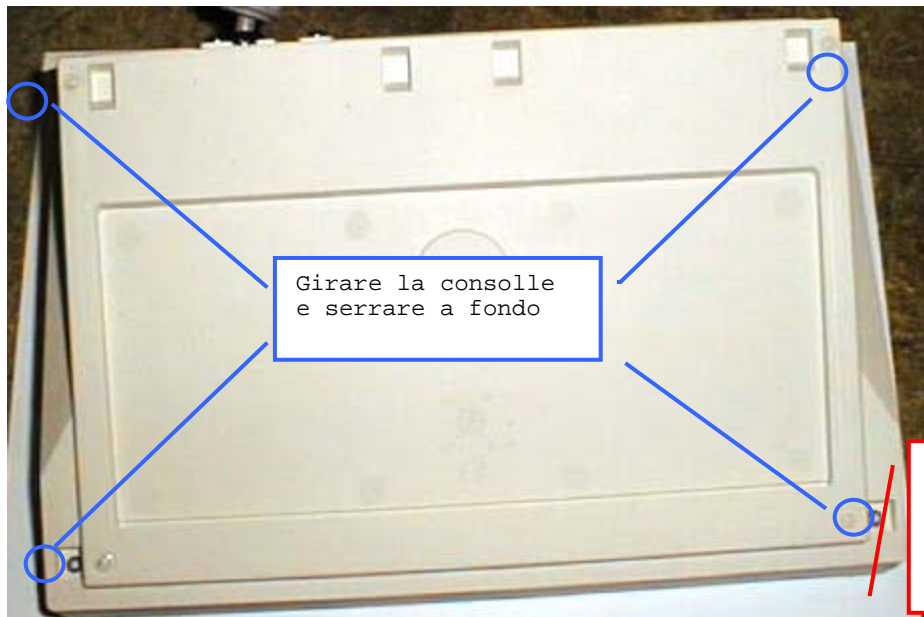

Girare la consolle e serrare a fondo

**Attenzione:**  
posizionare un panno sotto la Consolle

Emesso da: M.Besana	Data Emissione	16/06/05
Approvato da: M.Besana	CLASSE	13
NOME FILE E LOCAZIONE	ISO 9000/ 13 IMI / IMI-0149 MONTAGGIO CAVO STAMPANTE END.doc	FOGLIO 4 di 4