



odel x-ray



INSTALLATION & MODIFICATION INSTRUCTION

IMI-0165

IGBT 4DRIVER TRENCH 560214: SOSTITUZIONE RESISTENZA SU INGRESSO DC- di HCPL 3700

V1R1

Le resistenze sono R34, R49, R15, R65 DEL VALORE DI 3.9k; Vanno sostituite con 4 resistenze da 3.3k.

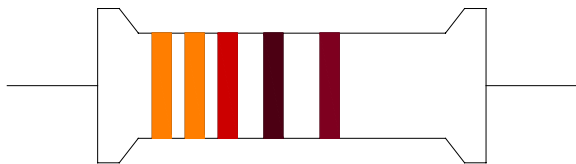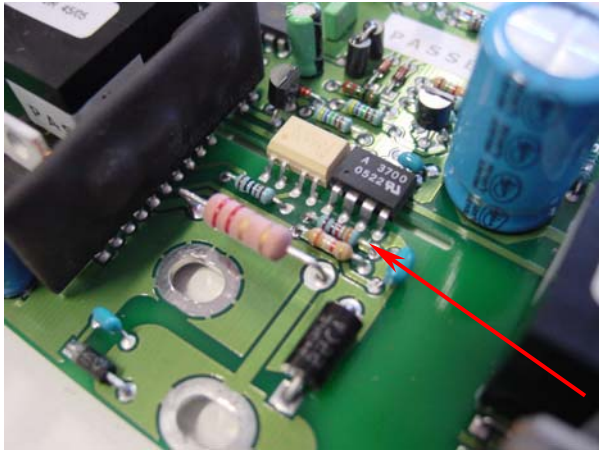

COLORI RESISTENZA 3.3k



Emesso da: G. Bramati		Data Emissione	27/01/06
		CLASSE	13
NOME FILE E LOCAZIONE	ISO 9000/ 13 IMI /IMI-0165 SOST RESISTENZA IGBT 4DRV US.doc	FOGLIO	1 di 1